

Протоколы сверления MEDENTiKA IPS Quattrocone, Quattrocone 30 и Microcone


MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

QUATTROCONE

Ø 3.5 Хирургический протокол Quattrocone 3.5 мм x 11 мм




Ø 3.8 Хирургический протокол Quattrocone 3.8 мм x 11 мм

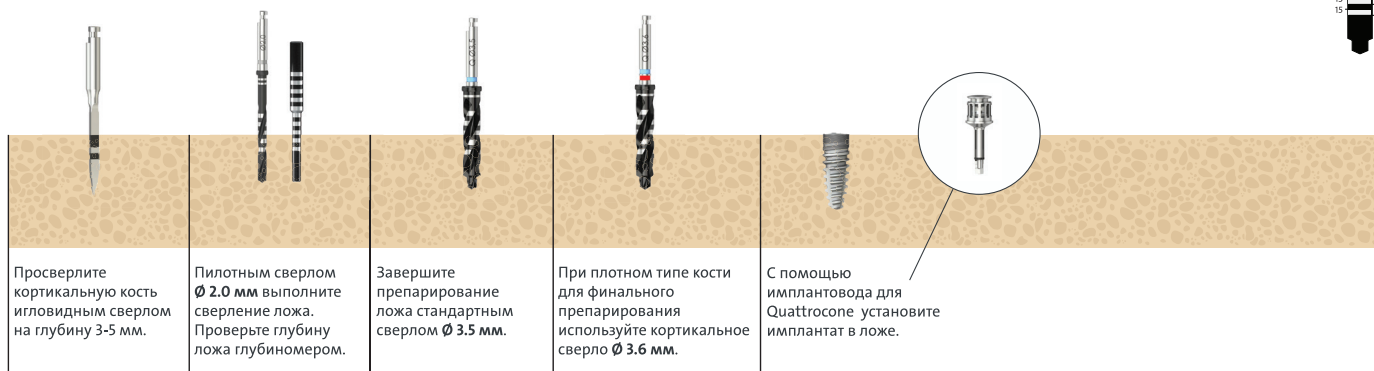

Ø 4.3 Хирургический протокол Quattrocone 4.3 мм x 11 мм



Ø 5.0 Хирургический протокол Quattrocone 5.0 мм x 11 мм

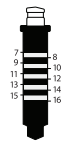

Просверлите кортикальную кость игловидным сверлом на глубину 3-5 мм.	Пилотным сверлом Ø 2.0 мм выполните сверление ложа. Проверьте глубину ложа глубинометром.	Для промежуточного сверления можете использовать стандартное сверло Ø 4.0 мм.	Завершите препарирование ложа стандартным сверлом Ø 4.7 мм.	При плотном типе кости для финального препарирования используйте кортикальное сверло Ø 4.8 мм.	С помощью имплантовода для Quattrocone установите имплантат в ложе.

QUATTROCONЕ30

Ø 4.3 Хирургический протокол Quattrocone30 4.3 мм x 11 мм

Просверлите кортикальную кость игловидным сверлом на глубину 3-5 мм.	Пилотным сверлом Ø 2.0 мм выполните сверление ложа для шаблона 30° на глубину до 9 мм.	После фиксации шаблона 30° выполните сверление пилотным сверлом Ø 2.0 мм параллельно шаблону под углом 30°.	Завершите препарирование ложа стандартным сверлом Ø 4.0 мм.	При плотном типе кости для финального препарирования используйте кортикальное сверло Ø 4.1 мм.	С помощью имплантовода для Quattrocone30 установите имплантат в ложе. Шейка имплантата должна располагаться горизонтально.

Ø 5.0 Хирургический протокол Quattrocone30 5.0 мм x 11 мм


Просверлите кортикальную кость игловидным сверлом на глубину 3-5 мм.	Пилотным сверлом Ø 2.0 мм выполните сверление ложа для шаблона 30° на глубину до 9 мм.	После фиксации шаблона 30° выполните сверление пилотным сверлом Ø 2.0 мм параллельно шаблону под углом 30°.	Продолжите препарирование ложа стандартным сверлом Ø 4.0 мм.	Завершите препарирование ложа стандартным сверлом Ø 4.7 мм.	При плотном типе кости для финального препарирования используйте кортикальное сверло Ø 4.8 мм.	С помощью имплантовода для Quattrocone30 установите имплантат в ложе. Шейка имплантата должна располагаться горизонтально.

MICROCONE


Ø 3.0 Хирургический протокол Microcone 3.0 мм x 11 мм




Ø 3.5 Хирургический протокол Microcone 3.5 мм x 11 мм

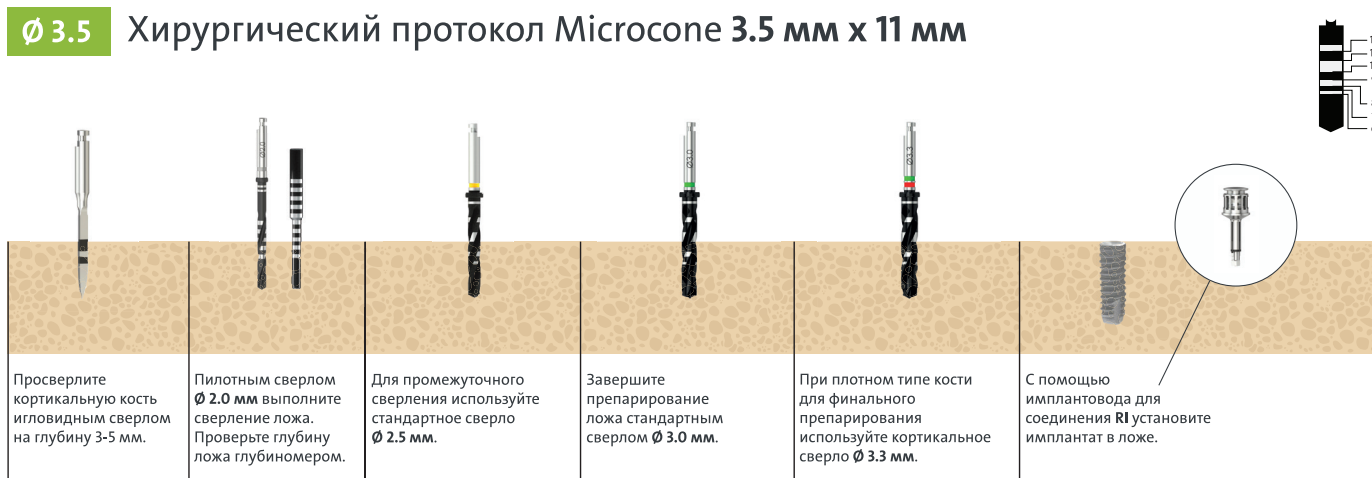

Ø 4.0 Хирургический протокол Microcone 4.0 мм x 11 мм

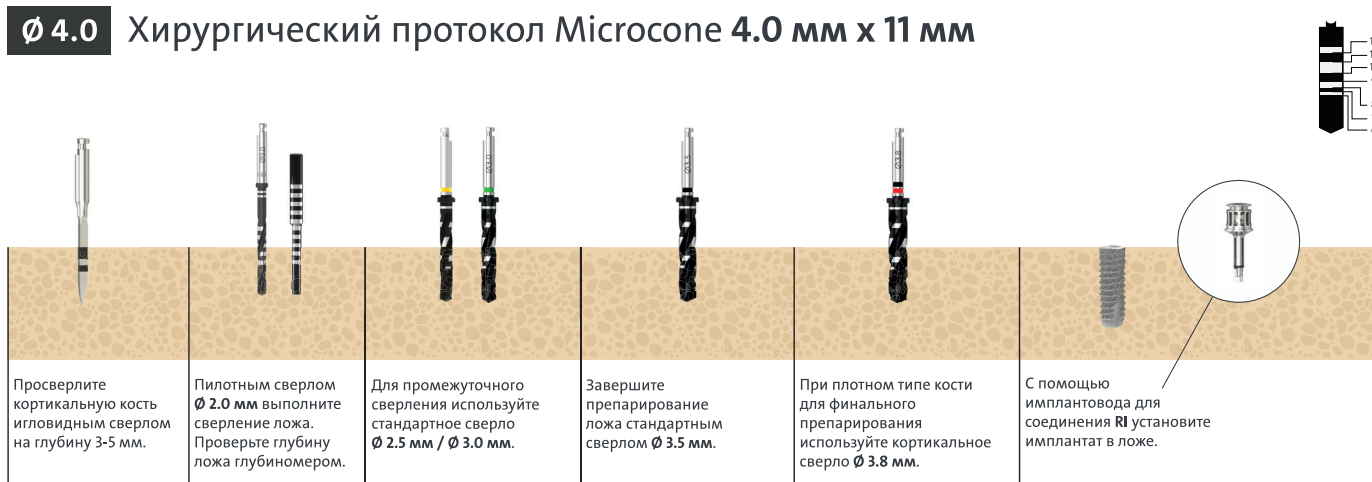

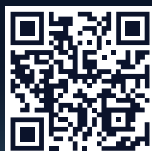


Заказывайте
MEDENTiKA®
онлайн



Подписывайтесь
на рассылку

Свяжитесь с нами:
Тел.: +7 495 139 74 74
E-mail: order.ru@straumann.com

Ø 4.5 Хирургический протокол Microcone 4.5 мм x 11 мм

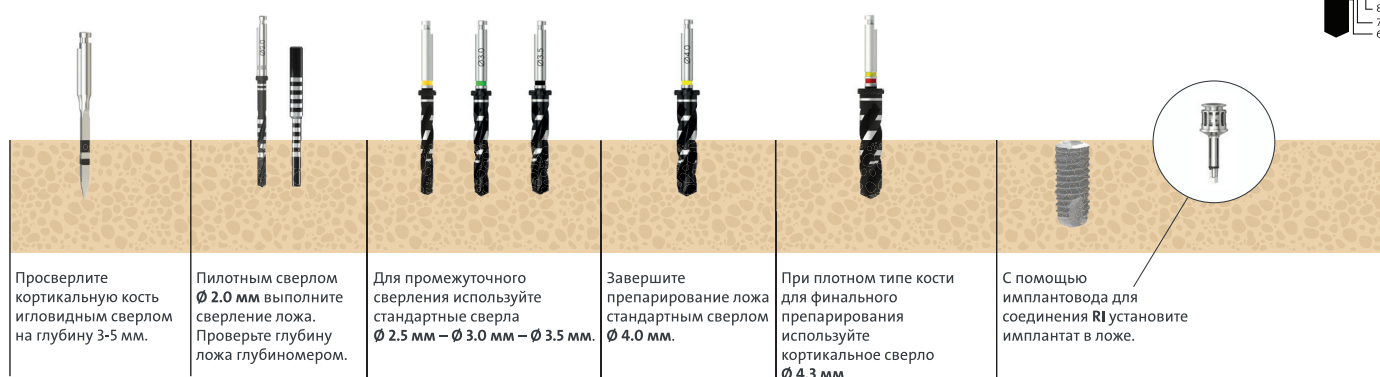

Ø 5.0 Хирургический протокол Microcone 5.0 мм x 11 мм



Ø 4.5 / 3.5 Хирургический протокол Microcone 4.5/3.5 мм x 11 мм

