

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508-08 рец. 087, сорт 1, полипропилен марки 01030 рец. 001, сорт 1, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003.

Лотки, изготовленные из полистирола или полипропилена, должны выдерживать стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75°C.

Лотки, изготовленные из материала армлен, должны выдерживать стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 при температуре (120+2)°С. (120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см², время выдержки 45 мин.).

Технические характеристики:

Номинальная вместимость 350 мл.

Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм.

Масса не более 80 гр.

Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Средний срок службы не менее 2-х лет.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г.



ОМ.23.40.12

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com