

АУРОФИЛЬМ Спрей для снятия напряжения с восковых и силиконовых поверхностей / AUROFILM PREPARATION LIQUID

Надежный увлажняющий агент при подготовке к паковке. Создает водонепроницаемую поверхность на восковой композиции, препятствует образованию пузырьков воздуха, т.е. пустот во время литья. Рекомендуется при моделировке коронок, мостовидных и бюгельных протезов.

Способ применения: АУРОФИЛЬМ легко наносится тонким слоем на поверхность воска мягкой кисточкой или с помощью спрея, а затем осторожно просушивается сжатым воздухом.

Меры предосторожности: АУРОФИЛЬМ – легко воспламеняющийся материал, содержит пропил-спирт. Контейнер с материалом должен быть закрыт и находиться далеко от огня. Не курите в рабочем помещении.



- код Стоматорг – 51125 / артикул BEGO – 52015
объем и форма выпуска – **бутыль 1000 мл**
- код Стоматорг – 51126 / артикул BEGO – 52019
объем и форма выпуска – **спрей 100 мл**