

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный прямоугольный с крышкой и ячейками ЛПпу-0,85-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для размещения различного, особенно, колющего и режущего инструмента, раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров, трахеотомических трубок.

Основные области применения: перевязочные, процедурные, медицинские посты различных отделений ЛПУ, ветлечебницы, виварии.

Детали лотка (корпус, крышка) изготавливаются из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 °С.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (температура 120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см<sup>2</sup>, время выдержки 45 мин.).

*Технические характеристики:*

*Номинальная вместимость 850 мл*

*Габаритные размеры не более (250±2)х(190±2)х(48±2) мм*

*Масса не более 330 гр.*

*Комплектность: Корпус - 1 шт.; крышка - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.*

*Средний срок службы не менее 2-х лет.*

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений его составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

**Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00131 от 17.11.2016г.**



ОМ № 23.36.10

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,  
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57

E-mail: [admin@elamed.com](mailto:admin@elamed.com)

[www.elamed.com](http://www.elamed.com)